

ІНСТРУКЦІЯ

Захисна маска-екран для обличчя


Захисна маска-екран - не тільки ефективний засіб захисту на час епідемії вірусів, а регулярна міра безпеки при щорічному загостренні сезонних інфекцій (грипу, ГРВІ тощо). Він виконаний у вигляді "щитів", що захищають від попадання дрібних частинок вірусу на обличчя і в дихальні шляхи. Екран можна використовувати як багаторазову медичну маску, він легко обробляється, виконаний з якісного матеріалу, який можна мити і дезінфікувати; має кріплення і надійно фіксується на голові.

Але потрібно мати на увазі, що захисний екран хоч і скорочує небезпеку передачі інфекцій повітряно-крапельним шляхом, але є додатковим засобом індивідуального захисту, краще, якщо ви будете використовувати його з медичною маскою

Комплектація: тримач та змінний екран

Спосіб зібрання:

- 1) Зняти захисну плівку з обох сторін екрану
- 2) Язик (1) з'єднати з витвором (2) на тримаче знизу вгору (див. мал. 1)
- 3) Язики (3) і (4) вигнути та з'єднати з витворами (5) та (6), (див. мал.1)
- 4) Замкнути захисний екран у витворах (5) та (6) потягнувши екран донизу (приклад замкнутого екрану див мал.2)
- 5) Вдягнути захисну маску на голову поверх медичного капелюха і відрегулювати по розміру (регулюючи резинку).

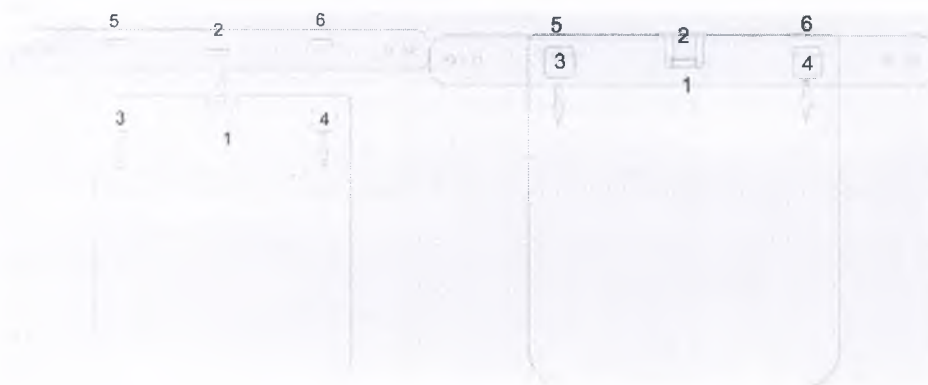

Мал. 1

Мал. 2

Рекомендації щодо дезінфекції:

- 1) Захисні екрани рекомендовано змінювати кожні 3 години, обробляючи змінну частину м'якою тканиною з дезінфікуючим засобом (розчин 3% розчину перекису водню з додаванням 0,5% миючого засобу)
- 2) Не нагрівати (дезінфікувати) вироб при температурі вище ніж 60С, щоб не деформувати пластик.
- 3) Не тримати змінні екрани поруч з металевими та гострими предметами, щоб не пошкодити поверхню.
- 4) Вироб не можна дезінфікувати у мікрохвильовій печі.

Виробник:

ФОП Сікорський Олександр Вікторович код ЗКПО 3119122432, адреса: вул. Лісогринівецька, буд. 26/3, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29027